

ESOXX

ONE

DISPOSITIVO MEDICO PER IL TRATTAMENTO
DEL **REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO**

STICK MONODOSE

INDICAZIONI

ESOXX ONE è un dispositivo medico ad azione meccanica che **consente di ridurre rapidamente i sintomi correlati al reflusso gastro-esofageo** quali: Piroisi, Dolore epigastrico, Rigurgito acido, Tosse irritativa, Disfonia.

La Malattia da Reflusso Gastro-esofageo, spesso abbreviata come MRGE (in inglese GERD, Gastro-Esophageal Reflux Disease), è caratterizzata da sintomi (piroisi, rigurgito acido, tosse irritativa, disfonia) che possono essere associati o meno a lesioni infiammatorie erosive della mucosa esofagea. La MRGE è in genere esacerbata dalla posizione supina, quindi i sintomi possono accentuarsi durante il riposo notturno.



ESOXX ONE è una associazione di **acido ialuronico** e **condroitin-solfato**, in grado di esercitare **un meccanismo di difesa della mucosa gastro-esofagea originale ed innovativo**.

La presenza nella formulazione di **ESOXX ONE** di un componente ad alta capacità bioadesiva (**poloxamer 407**), favorendo la permanenza del contatto con la superficie della parete esofagea dell'acido ialuronico e del condroitin-solfato, contribuisce all'effetto protettivo nei confronti dell'azione dell'acido cloridrico prodotto dallo stomaco.

Il condroitin-solfato possiede inoltre un'azione favorente i processi riparativi della mucosa gastro-esofagea.

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico, condroitina solfato, polivinilpirrolidone, xilitolo, sodio benzoato, potassio sorbato, aroma uva, acqua demineralizzata, poloxamer 407.

CONFEZIONE

20 stick (bustine monodose) da 10 ml.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Uno stick (bustina monodose) dopo i pasti principali e al momento di coricarsi o secondo consiglio medico. La soluzione può essere bevuta direttamente dallo stick.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna in particolare, salvo casi di ipersensibilità nei confronti di uno dei suoi componenti. In tale circostanza interrompere il trattamento e contattare il proprio medico. Anche se non sono conosciuti effetti collaterali, si consiglia di non utilizzare il prodotto durante la gravidanza o nei primi mesi dell'allattamento. In ogni caso, consultare prima il proprio medico. Non sono note interazioni con altri prodotti per via orale.

AVVERTENZE

Non eccedere la dose consigliata. Se le manifestazioni dovessero persistere consultare il proprio medico. Non essendo disponibili dati clinici sui bambini al di sotto dei 12 anni, non somministrare il prodotto a bambini al di sotto dei 12 anni. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Non congelare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Fabbricante: **Biofarma** - Via Castelliere, 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD) – ITALIA

Distributore: **Alfasigma S.p.A.**

Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO) – ITALIA

